

Kasutusjuhend

MUDEL KF-B P06 (R) **TOOTEMÄRK** Täiskasvanud tüüp (KF-B P06(R)) **TÄIDESAA-TEV STANDARD** EN 14683:2019+AC:2019 **TASE** EN 14683:2019+AC:2019 Tüüp IIR **TEHNILISED ANDMED** Lame tüüp 17.5cm x 9.5cm **KONSTRUKTSIOON JA KOOSTIS** Käesolev toode koosneb kudumata PP-riidest, sulatuspuhutud PP-riidest, ninapealsest vormitavast osast ja kummipaeltest. **KASUTUSOTSTARVE** Käesolev ühekordseks kasutamiseks mõeldud kirurgiline kaitsemask on ette nähtud meditsiinilise personali kasutusse invasiivsete protseduuride tegemisel katmaks kasutaja suud, nina ja lõuga ning pakkumaks füüsilist kaitset, mis tõkestab patogeenide, mikroorganismide, kehavedelike, osakeste jt otsest läbipääsu. **TOOTE OMADUSED** 1. Bakterite filtreerimise efektiivsus (BFE): $\geq 98\%$ 2. Rõhkude erinevus (Delta-P): $< 60 \text{ Pa/cm}^2$ 3. Pritsme- kindlus: $\geq 16.0 \text{ kPa}$ (120mmHg) 4. Mikroobipuhutus: $\leq 30 \text{ cfu/g}$ **KASUTUSJUHISED** 1. Ava tihe pakend ja võta kaitsemask välja. 2. Aseta kaitsemask näo ja nina ette horisontaalses asendis selliselt, et selle ninapealne vormitav osa on ülespoole. 3. Aseta mõlemate käte sõrmeotsad ninapealse vormitava osa peale ja keskelt alustades vajuta sissepoole. Liigu vähehaaval külgedele ja vormi kaitsemaski ninapealne osa ninaku- jule vastavaks. 4. Kaitsemaski kasutamiseks tõmba kummipaelad kõrvade taha. 5. Kohanda kaitsemaski volditud osa ja tee kaitsemask sel viisil laiemaks. **ETTEVAATUSABINÕUD** 1. Käesolev toode on steriliseerimata kaitsemask. 2. Käesoleva toote kehtivusaeg on kaks aastat. Kasuta toodet enne kehtivusaja lõppemist. 3. Toode on ühekordseks kasutamiseks ja seda ei tohi uuesti kasutada ega ringlusse võtta. Pärast kasutamist tuleb mask koheselt hävitada või visata asjakohasesse prügikonteinerisse. 4. Kas enne kasutamist kontrollisid, et pakend oli terve. Ära kasuta toodet, kui pakend on kahjustada saanud. 5. Ära kasuta toodet, kui oled selle suhtes allergiline. 6. Käesoleva toote vale kasutamine võib tekitada hingamisraskusi. 7. Kasutatud kaitsemaske peetakse väga saastunuks, seetõttu on tähtis, et: a) Kasutaja ei puuduta oma sõrmede/ kätega kaitsemaski riidest osa; b) Käed desinfitseeritakse (täielik käte desinfitseeritakse pärast kaitsemaski kasutusest eemaldamist; c) Kaitsemaski kasutatakse nii, et ta katab kasutaja nina ja suu; kaitsemask ei tohi kunagi kasutaja kaelas rippuda; d) Kasutatud kaitsemask tuleb hävitada, kui teda enam ei kasutata, ja pärast igat ravitoimingut; kui kaitse on jälle vajalik, tuleb kasutusele võtta uus kaitsemask. **KEHTIVUSAEG** 2 aastat **LADUSTAMIS- JA TRANSPORTIMISTINGIMUSED** Pakendis olevaid kirurgilisi kaitsemaske tuleb säilitada tavapärasel toatemperatuuril ja suhteline niiskus tohib olla maksimaalselt 80%. Ruumides ei tohi olla söövitavat gaasi, tuleb tagada hea ventilatsioon ning tuleohutus ja kaitse kahjurite eest. Transpordi ajal hoida niiskusest, valgusest ja soojusest eemal. **PAKEND** 50 tk/kott **VALMISTAMISKUUPÄEV** Vaata pakend **PARTII NUMBER** Vaata pakend



GUANGDONG KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.

NO.28, Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City, Guangdong Province, China **E-POST:** nordics@kingfa.com.cn

IMPORTIJA: Medkit Finland Oy

ADDRESS: Haaranuontie 6, 90240 Oulu Finland

E-POST: info@medkit.fi

Kasutusjuhend

Skeemide ja sümbolite kirjeldused

1		CE-märgise sümbol. Antud sümbol väljendab, et toode vastab Euroopa Liidu tarbijaohutuse, tervise- ja keskkonnanõuetele.
2		Steriliseerimata.
3		Vastavalt EL direktiividele 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ väljendab seadme valmistaja.
4		Väljendab Euroopa Ühenduses oleva volitatud esindaja.
5		Loe kasutusjuhend enne kasutamist läbi.
6		Valmistuskuupäev. Selle sümboli juures on kuupäev, mis teatab valmistamise kuupäeva.
7		Ära kasuta toodet, kui pakend on kahjustunud.
8		Ära kasuta uuesti.
9		Ära viska toodet olmeprügi hulka.
10		Hoida kuivana.
11		See pool üles.
12		Kergesti purunev, käsitseda ettevaatlikult.
13		Vältida otsest päikesevalgust.
14		Kõlblikusaeg.
15		Partii number.
16		Maksimaalselt tohib üksteise peale laduda.
17		Meditsiiniline seade.