

„CEDERROTH“

AKIŲ PLOVIMO PRODUKTAI



Vaizdo įrašą apie tai, kaip juo naudotis, žiūrėkite čia.

Rūpinkintės savo akimis – žiūrėkite vaizdo įrašą (tik 2 minučių trukmės).

Regėjimo išsaugojimas



1. Pradėkite plauti kuo skubiau.

Didžiausias poveikis pasiekiamas per pirmąsias akimirkas.

2. Skalaukite gausiai.

Skaludami akį būkite atsimerkę. Pirštais atmerkite akį.

3. Skalaukite nepertraukiamai.

Skalaukite bent 15 minučių. Naudokite keletą akių ploviklio buteliukų arba tęskite skalavimą nuolatinėje akių plovimo sistemoje.

Patarimas

Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų akių plovimo mokykloje www.cederroth.com



CEDERROTH akių plovimo punktas

Kodas 721500



CEDERROTH sieninis laikiklis

Kodas 7200

CEDERROTH akių ploviklis,

2 vnt. po 500 ml

Kodas 725200

Skubiai pagalbai užtikrinti nešiokitės asmeninį kišeninio dydžio akių ploviklio buteliuką.



CEDERROTH kišeninio dydžio akių ploviklis

Kodas 7221

CEDERROTH dėklas

Kodas 720300



RŪPINKITĖS SAVO AKIMIS



Įrodyta, kad „Cederroth“ akių ploviklis labai efektyvus gydant šarmų ir rūgščių tiškalus.*

Darbo vietose, kuriose didelė akių traumų rizika, kaip antai statybvietėse, sandėliuose, viešojo maitinimo virtuvėse, pramonės objektuose ir laboratorijose, itin svarbu turėti tinkamas pirmosios pagalbos priemones akims.

Tinkamos priemonės suteikia Jums daugiau šansų išsaugoti regėjimą.

Jums ar kam nors šalia Jūsų į akis patekus ardančių (ėsdinančių) medžiagų, gyvybiškai svarbi neatidėliotina prieiga prie tinkamos rūšies akių ploviklio – svarbi kiekviena sekundė. Štai kodėl turėtumėte užtikrinti, kad Jūs ir Jūsų kolegos turėtumėte tinkamų priemonių.

Kas nutinka akies traumos atveju?

Mūsų akių pH yra neutralus (pH 7). Rūgščių pH žemas, o šarmų – aukštas. Šarmams ar rūgštims patekus į akis, pasikeičia pH dydis ir prasideda korozija. Norint sustabdyti šią korozinę reakciją, labai svarbu skubiai atkurti neutralų akies pH dydį.

Turėkite omenyje, kad bet kokią akių traumą visuomet turėtų apžiūrėti gydytojas. Pasiimkite kelis buteliukus akių ploviklio, kad praskalautumėte akį pakeliui į ligoninę. Jei neturite prieigos prie pirmosios pagalbos priemonių, naudokite drungną vandenį ir puodelį.

Kokios medžiagos pavojingos?

Šarminės medžiagos – 2/3 visų korozinių akių traumų priežasčių. Šarmai, cemento dulkės, amoniakas, trinatrio fosfatas, indaplovių milteliai – šarmų pavyzdžiai. Šarmai giliau prasiskverbia

į akies audinį ir gali rimtai pakenkti regėjimui, dažnai tokia žala būna ilgalaikė. Rūgštys taip pat sukelia korozines traumas, tačiau jos atsiranda akies paviršiuje ir paprastai gali būti pagydomos. Rūgščių pavyzdžiai: akumuliatorių (sieros), druskos, fosforo ir acto rūgštys.

Esant akių traumoms, svarbu naudoti akių ploviklį, kuris ne tik praskiedžia, bet ir išplauna visas ardančias (ėsdinančias) medžiagas. „Cederroth“ buferinį akių ploviklį rekomenduoja akių specialistai, nes jis turi neutralizuojamąjį poveikį.*

Kaip veikia buferinis akių ploviklis?

Boratinis „Cederroth“ buferinis tirpalas aktyviai grąžina pH į neutralų, priešingai nei nebuferinis akių ploviklis, kuris tik atskiedžia ir išplauna pašalines medžiagas. „Cederroth“ akių ploviklis veikia kaip amortizatorius ir efektyviau nei įprastinis natrio chlorido tirpalas atkuria normalų akies pH.

Koks akių ploviklio galiojimo terminas?

„Cederroth“ akių ploviklis turi ilgiausią galiojimo terminą rinkoje – 4,5 metų.

* Paprastai turi stipresnį poveikį šarmams nei rūgštims.

Rihawi ir kt., Graefe's arch. Clin. Exp. ophthalmol. (2006) 244:845-854